

MANUALE UTENTE

FUNZIONAMENTO DEGLI OTTOTIPI LUMINOSI.

APPENDERE L'OTTOTIPO AL MURO COME SE FOSSE UN QUADRO UTILIZZANDO I CHIODINI DI ACCIAIO IN DOTAZIONE (OPPURE DUE TASSELLI PICCOLI NON IN DOTAZIONE). L'ALTEZZA VARIA SECONDO LA SEDIA O POLTRONA UTILIZZATA PER FAR SEDERE IL PAZIENTE IN GENERE CONSIGLIAMO DI POSIZIONARE L'OTTOTIPO 10 CM SOPRA ALL'ALTEZZA DEGLI OCCHI DI UN PAZIENTE DI MEDIA ALTEZZA. (SCONSIGLIAMO DI POSIZIONARE TROPPO IN ALTO O TROPPO IN BASSO L'OTTOTIPO).

A questo punto posizionare a terra, o meglio su un tavolo. L'alimentatore è dotato di appositi gommini.

Collegare lo spinotto dell'ottotipo al connettore a tre poli dell'alimentatore tenendo presente la "tacca" di riferimento.

Collegare il cordone di alimentazione alla rete elettrica.

Posizionare l'interruttore su 1 e regolare l'intensità luminosa desiderata mediante il regolatore sull'alimentatore.

Il CONTRASTO OTTOTIPO / LUCE STANZA, deve essere regolato in funzione della luce presente della stanza, non deve essere molto forte ma sufficiente a rendere visibili e ben contrastate le scritte nere.

N.b. Per sostituire il fusibile posto nella presa accanto all'interruttore 0/1, togliere il cordone di alimentazione, tirare con un cacciavite la linguetta del contenitore fusibile posto tra l'interruttore e la presa, sostituire il fusibile con un fusibile da 1A Ampere.

Non utilizzare per scopi non previsti.

Si raccomanda di spegnere sempre l'interruttore sulla scatola a fine lavoro per non lasciare sotto tensione l'alimentatore.

