

Manuale D'Uso
Vision Test
Scandurra S.r.l.

Elite



Scandurra S.r.l.

Produzione - Vendita - Noleggio - Assistenza - Apparecchiature elettromedicali ed elettroniche
OPHTALMOLOGIA - OPTOMETRIA - CHIRURGIA - LASER CHIRURGICI - LASER ECCIMERI

Via Ugo Foscolo,1 - 98027 Roccalumera (Me) Tel: +39 0942 680737 Cell: +39 348 3418084
Web: www.scandurrasrl.it Mail: info@scandurrasrl.com

1. Portare l'interruttore di alimentazione da posizione 0



2. Alla posizione 1




3. Attendere l'avvio del Vision Test



4. Il Monitor dovrebbe avviarsi automaticamente in caso contrario premere il pulsante apposito posto sotto di esso



5. Utilizzare il telecomando in dotazione per spostarsi tra i menù

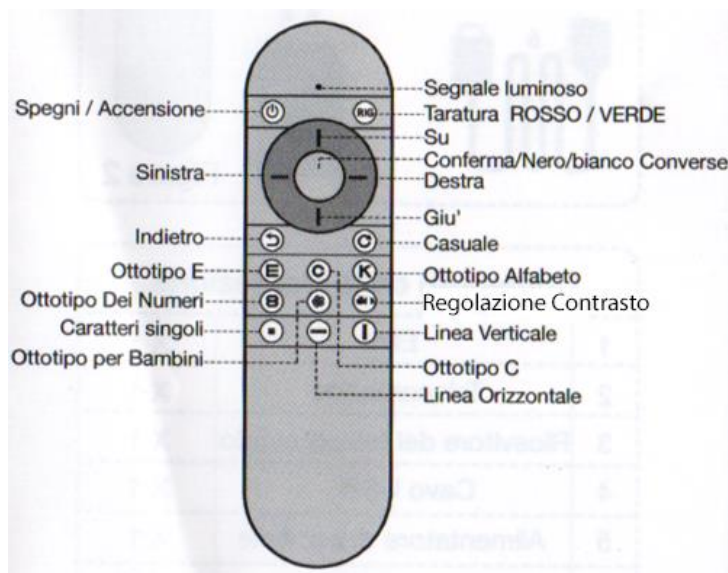

6. Selezionare la Voce "Ottotipo"



7. Confermando col tasto centrale del telecomando



8. Successivamente apparirà la schermata con le lettere



9. Utilizzare il telecomando i decimi spostando le frecce su e giù

10. Per cambiare test utilizzare i seguenti tasti del telecomando:



= E di Albin



= C di Landolt



= Bambini



= Numeri



= Lettere

11.  = Tasto Indietro, utilizzarlo per tornare indietro e selezionare gli altri test



12.  Andare nuovamente indietro per tornare al menu principale



13.  = Tenere premuto il tasto power per spegnere il Vision Test

14. Portare l'interruttore sulla Posizione 0 per togliere definitivamente l'alimentazione



REGOLAZIONE CONTRASTO OPZIONALE

Avviare l'Ottotipo con le lettere come da esempio o con altri test



Cliccare sul tasto contrasto



Spostarsi con le frecce sinistra e destra del telecomando

Di seguito sono riportati vari esempi di regolazione:

E' consigliabile lasciare la regolazione del contrasto al 100% come di default



GUIDA INSTALLAZIONE


1. Montaggio su tavolo con base in dotazione



2. Montaggio a muro con staffa e tasselli in dotazione



INSERIRE LE VITI NELLE FESSURE CONTRASSEGNALE CON LE FRECCHE

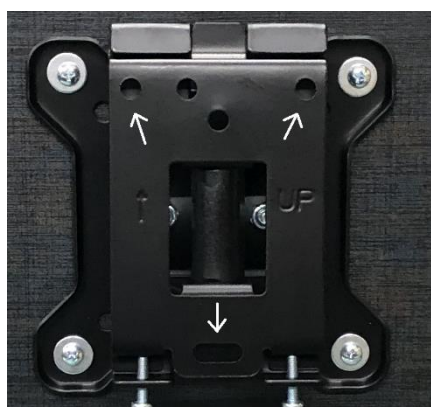

SERVICE ONLY

IMPOSTAZIONE DI FABBRICA 3.0MT

POTETE VARIARE LA DISTANZA DEL VISION TEST MISURANDO CON UN METRO DALLA TESTA DEL PAZIENTE ALLO SCHERMO


REGOLARE AGENDO SUI TASTI + E – DELLO SCHERMO

POSSIBILITA' DI TARATURA DA MIN 1.0 a MAX 7.0MT CON POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE MILLIMETRICA

LA NUOVA MISURA VERRA' SALVATA IN AUTOMATICO TORNANDO SEMPLICEMENTE INDIETRO DAL TELECOMANDO

IMPOSTARE TUTTI I VALORI SU DECIMAL

LASCIARE COME DA FIGURA TUTTE LE RESTANTI IMPOSTAZIONI

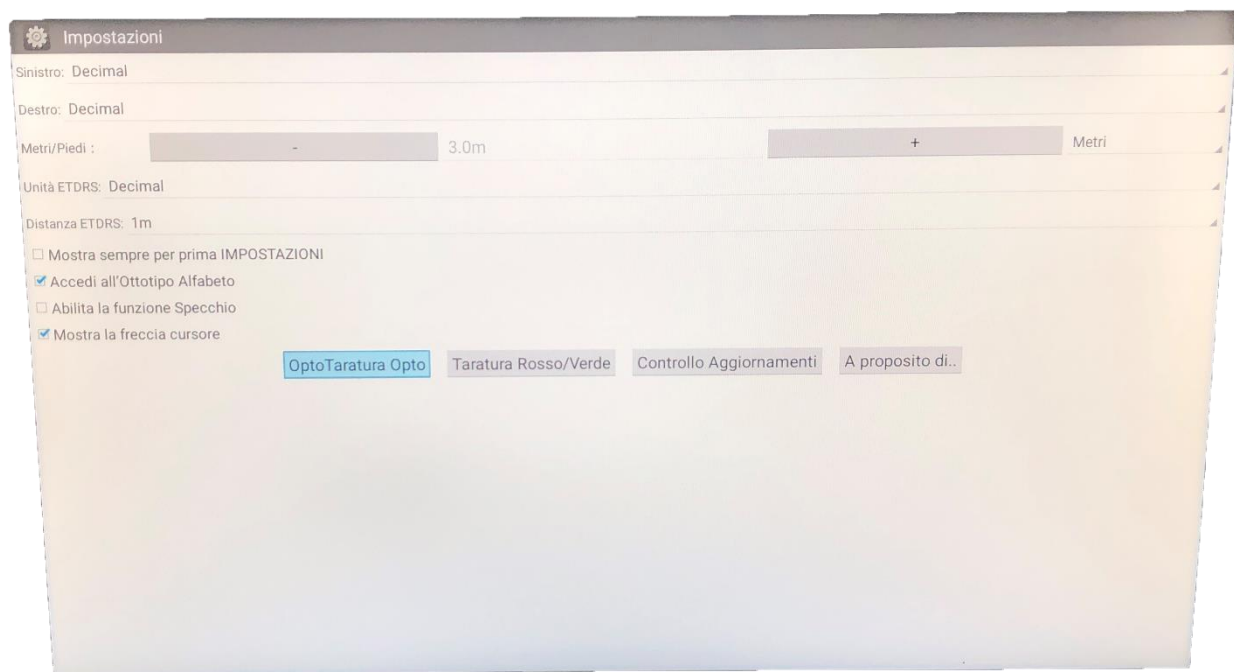

TARARE L'OTTOTIPO COME DA FIGURA SOTTO RIPORTATA:



VERIFICARE LE TARATURE COME DA FIGURA CON LO STRUMENTO DI TARATURA IN DOTAZIONE

